

新登場


CANKÚRE

創克 口腔貼片

獨有專利配方 IALUZERO®

強效保護膜

擊退病毒細菌

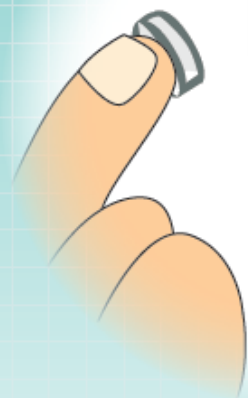

使用三部曲

- 貼片快速溶解，毋須取出
- 微細分子形成革命性保護膜
- 獨有生物材料，迅速復原組織

適用於口腔黏膜、舌頭及牙床創口

意大利製造

每盒 10 片



網址：www.chonglap.com



ID: Chonglaphk

Distributed by:
Chong Lap Asia - Pacific Pharmaceutical Limited

獨有專利配方 IALUZERO®

CANKÚRE 創克口腔貼片



對口腔黏膜及其他牙床創口引起的痛楚，尤為有效。

快速
溶解

保護
薄膜

復原
組織

- ✓ 貼片的活性成分會於患處快速溶解。
- ✓ 先進的生物材料 IALUZERO® 形成保護膜，為口腔提供革命性保護，減輕進食時的痛楚。
- ✓ IALUZERO® 的極微細分子，能復原組織，令創口迅速痊癒。

成分：IALUZERO®

功能：用於保護口腔黏膜、舌頭及牙床創口，減低刺激。

建議用量：每日三次

適用人士：成人及 3 歲或以上小童

注意：請避免使用貼片後馬上進食。如有需要，每天可用 3 片或以上。

使用方法

1. 首先拍乾患處的唾液。



2. 以清潔的手撕出一片「創克」口腔貼片。



3. 將貼片有黏性的一面貼於創口。



4. 按壓貼片 3 秒。



5. 口腔貼片會貼於患處，直至全部溶化，不需取出。



6. 避免使用貼片後馬上進食。

