


新登場

意大利製造

# QUELODERM

## 強力疤褪疤貼

獨有專利配方 IALUZERO®

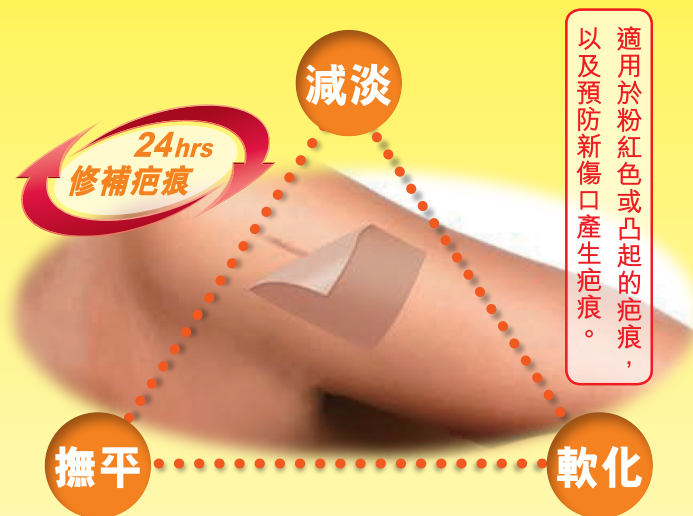

自黏性聚氨酯薄膜  
由皮膚表面直接滲入

每盒 4 片 (每片 5x7cm)

\* 成人及兒童適用



網址：[www.chonglap.com](http://www.chonglap.com)



ID: Chonglaphk

Distributed by:  
Chong Lap Asia - Pacific Pharmaceutical Limited



# QUELODERM 強力疤褪疤貼

獨有專利配方 IALUZERO®



超薄 • 有彈性 • 透氣 • 耐用 • 天然膚色




◆ **強力疤**是一種自黏性超薄褪疤貼片，特有 IALUZERO® 專利配方，可加速修補組織，令疤痕減淡。

◆ 它可以封閉癒合的傷口或舊有疤痕處，並提供合適的環境使傷口組織得以平整及軟化，繼而預防疤痕的形成或褪去。

◆ **強力疤**褪疤貼，適用舊有的粉紅色或凸起的疤痕；亦適用於防止新癒合傷口上產生疤痕。

## 使用方法

1. 將強力疤褪疤貼取出，按疤痕大小剪裁使用。通常把貼片剪裁至比疤痕大 1-2 厘米。
2. 使用前先將疤痕部位清洗乾淨，並視疤痕狀況先行修剪周圍多餘的毛髮，從而可以增加黏貼度且更舒適。
3. 直接貼於疤痕上，撫平貼片以確保其能緊貼。貼片應每天 24 小時連續貼於疤痕上。

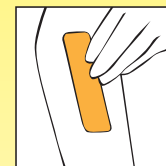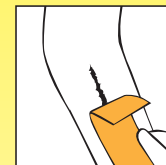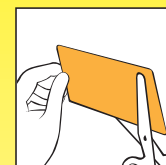

## 注意事項

- 褪疤貼無需清洗；每片可連續使用 7 天（視乎個人皮膚狀況，受汗水和沐浴影響。）使用期間若失去黏性時應馬上更換新貼。
- 療程時間視乎疤痕大小而定，一般預防疤痕形成療程約為 3 個月或以上；淡化疤痕的療程需時可更長。
- 若疤痕貼邊緣因摩擦造成黏性不佳或捲起時，可將捲起部分邊緣作適當的修剪，並繼續使用。
- 有過敏或紅疹反應時，應立即停止使用，請向醫護專業人士諮詢意見。
- 此產品僅限外用。